

SOPELEK Aspirator do nosa aparat + 3końcówki, aspirator, 1 op.



Cena: 17,93 zł

Opis słownikowy

Producent /
Podmiot
Odpowiedzialny

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Przechowywanie

Temperatura pokojowa

Rejestracja

Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Działanie produktu:

- Pozwala usunąć wydzielinę z dziecięcego nosa podczas kataru.
- Dzięki temu dziecko może znów swobodnie oddychać.
- Regularne oczyszczanie nosa dziecka z kataru poprawia komfort dziecka i pozwala ograniczyć częstość występowania infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wskazania do stosowania:

Wyrób medyczny, aspirator do nosa Sopelek jest polecany do oczyszczania nosa z wydzieliny u dzieci, które jeszcze nie potrafią samodzielnie wyczyścić nosa.

Sposób użycia:

1. Nałóż końcówkę z jednorazowym filtrem absorbującym na główny cylinder aspiratora,
2. Delikatnie wsuń końcówkę do otworu nosowego dziecka, a ustnik włóż do swoich ust,
3. Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik,
4. Powtórz wymienione czynności przy drugim otworze nosowym,
5. Zdejmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem i wyrzuć ją.
6. Jeśli dziecko ma trudności w oddychaniu, lub katar jest gęsty, przed odciągnięciem wydzieliny można wkropić do nosa dziecka kilka kropli roztworu soli morskiej izotonicznej lub soli fizjologicznej przeznaczonej do użycia donosowego.

Zawartość zestawu:

- Aspirator do nosa - cylinder główny z ustnikiem,
- Wymienne, jednorazowe końcówki z filtrami - 3 szt.

Ważne uwagi oraz informacje:

Aby zachować higienę i zapobiec powtórnej infekcji:

1. Wyparz po każdym użyciu cylinder główny z ustnikiem,
2. Zawsze używaj nowych końcówek z filtrem absorbującym,
3. Aspirator przechowuj w suchym i czystym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga:

Proces odsysania wydzieliny z nosa dziecka może być przeprowadzany tylko przez dorosłą osobę!