

# Suplasyn, roztwór do wstrzykiwań, 1 amp.-strz.

Cena: 92,73 zł



## Opis słownikowy

Postać	Ampułkostrzykawki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	STADA POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

Suplasyn zalecany jest w objawowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Zadaniem zastrzyku z kwasem hialuronowym jest poprawa funkcjonowania stawów, ochrona stawów oraz regeneracja chrząstki stawowej. Suplasyn podaje się bezpośrednio do stawów dotkniętych chorobą zwyrodnieniową, np. staw kolanowy, staw biodrowy.

### Zastrzyki dostawowe Suplasyn:

- Poprawiają ruchomość stawów;
- Poprawiają właściwości amortyzujące stawów;
- Opóźniają proces degeneracji chrząstki stawowej;
- Zwiększają ilość substancji smarujących;
- Poprawiają lepkość i elastyczność płynu dostawowego;
- Wspomagają odbudowę stawów;
- Łagodzą ból związany z chorobą zwyrodnieniową.

### Dawkowanie

Dostawowo 1 wstrzyknięcie na tydzień przez 3-6 tygodni.

Suplasyn – jak często powtarzać zastrzyki kwasu hialuronowego?

Zazwyczaj zalecane jest podanie 3-6 zastrzyków w odstępach tygodniowych. O ilości podanych zastrzyków decyduje lekarz.

### Skład

1 ampułkostrzykawka Suplasyn 2 ml zawiera:

- Kwas hialuronowy 20 mg/2ml,
- Substancje pomocnicze.

#### *Zastryk w kolano?*

Suplasyn może być podawany do wszystkich stawów objętych chorobą zwyrodnieniową, np. staw kolanowy, staw biodrowy, staw ramienny, staw w nadgarstku, staw skokowy. Najczęściej zastryk Suplasyn stosowany jest do stawu kolanowego.

#### *Czy po zastrzyku w kolano można chodzić?*

Po podaniu zastrzyku z kwasem hialuronowym w kolano zalecany jest odpoczynek i unikanie intensywnego wysiłku fizycznego przez 1-2 dni. Chodzisz możesz, ale nie można się forsować

#### **Podmiot odpowiedzialny**

Stada Poland Sp. z o.o.  
ul. Krakowiaków 44,  
02-255 Warszawa  
Poland