

# Sutricon Plastry silikonowe na blizny 5x30cm, 5 szt.

Cena: 118,13 zł



## Opis słownikowy

Postać	Plastry / Przylepiec
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VERCO
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

#### **Wskazania:**

Silikonowe plastry Sutricon 5x30 cm stosowane są na blizny:

- O dużych powierzchniach;
- Po rozległych operacjach chirurgicznych (np. operacje kręgosłupa, abdominoplastyka);
- Po plastyce kończyn górnych i dolnych;
- Po niewielkich przeszczepach skóry;
- Mogą być stosowane powyżej 6. miesiąca życia;
- Świeże i dojrzałe.

Silikonowe plastry Sutricon 3x10 cm stosowane są na blizny:

- O małych powierzchniach;
- Po plastyce piersi;
- Po niewielkich zabiegach chirurgicznych (np. tyroidektomia);
- Po operacjach laparoskopowych;
- Po mniejszych oparzeniach i stłuczeniach;
- Po usuwaniu znamion;
- Mogą być stosowane powyżej 6. miesiąca życia;
- Świeże i dojrzałe.

#### **Zalety produktu**

- Łatwo dostosowują się do powierzchni skóry;
- Aplikacja 1 dziennie i aktywne działanie przez 24 godziny;
- Zabezpieczają przed powstawaniem blizn przerostowych i keloidów;

- Zmniejszają widoczność blizny – rozjaśniają ją i wygładzają;
- Zmniejszają napięcie oraz uczucie ciągnięcia i swędzenia;
- Plastry silikonowe posiadają rekomendację Międzynarodowego Zespołu Ekspertów ds. Leczenia Blizn;
- Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze.

#### **Składniki**

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

#### **Sposób użycia i zawartość opakowania**

Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejść wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon na blizny.

W przypadku zastosowania plastra na bliznę znajdującą się w miejscu narażoną na rozciągnięcie (np. staw kolanowy, staw łokciowy) tak jak w przypadku innych produktów w postaci plastra, może nastąpić jego odklejenie i przemieszczenie.

Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster = 3 – 5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster. Długość terapii to średnio:

- min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych
- min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych

Opakowanie: 5 plastrów 5×30 cm, 5 plastrów 3×10 cm

#### **Środki ostrożności**

Plastry Sutricon nie mogą być stosowane na:

- Rany otwarte;
- Rany sączące;
- Oparzenia;
- Błony śluzowe.