

Sutricon Żel na blizny Silikonowy, 15 ml

Cena: 31,50 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VERCO
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Wskazania

Sutricon żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji blizn:

- Zlokalizowanych na odkrytych i ruchomych powierzchniach ciała i twarzy,
- O długości do 10 cm,
- Po liftingu twarzy i szyi,
- Po korekcie powiek,
- Po zabiegach chirurgicznych w okolicach ust (np. lip lift),
- Po mniejszych oparzeniach i przerwaniu ciągłości skóry na ruchomych partiach ciała,
- Po przeszczepie skóry w okolicy twarzy,
- Zlokalizowane w obrębie stawów i zgięć kończyn górnych i dolnych,
- Przerostowe i bliznowce.

Działanie

Regularne stosowanie żelu silikonowego Sutricon® poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Żel szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed czynnikami zewnętrznymi. Może być stosowany w celu wspomagania leczenia blizn przerostowych i keloidów. Łagodzi objawy związane z posiadaniem blizny takie jak świąd czy uczucie ciągnięcia.

Zalety produktu

- Zmniejsza widoczność blizn i wyrównuje jej koloryt.
- Zapewnia matowe wykończenie bez efektu świeżącego filmu (non-oily).
- Żel o lekkiej, niewodnistej konsystencji.
- Efekt szybkiego wysychania na powierzchni skóry – może być stosowany pod makijaż.
- Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi, np. masażem blizny.

- Może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

Składniki

polisiloksany, dwutlenek krzemu

Sposób użycia i zawartość opakowania

Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można rozpocząć stosowanie żelu Sutricon. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie. Długość stosowania jest indywidualna i zależy od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkowań genetycznych oraz od jej rodzaju:

- minimum 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn
- w przypadku starszych blizn na efekty należy poczekać dłużej, nawet do 6 miesięcy

Opakowanie:

Żel silikonowy o pojemności 15 ml