

SutriSept Hydrożel na rany, 30 ml

Cena: 35,44 zł



Opis słownikowy

Postać	Hydrożel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VERCO
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

SutriSept w Gel Hydrożel na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego nawilżania, ochrony, pielęgnacji ran i oparzeń. SutriSept bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do pielęgnacji, ochrony i nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran.

Zgodnie z najnowszymi (z 2020 roku) wytycznymi ekspertów SutriSept rekomendowany jest jako pierwszy wybór w:

- Odkazaniu ran;
- Oparzeniach;
- Ranach z infekcją;
- Ranach z biofilmem.

Działanie:

SutriSept w Gel Hydrożel na rany tworzy w miejscu nałożenia warstwę ochronną i mechanicznie zapobiega przyleganiu mikroorganizmów do obszaru rany. SutriSept® Hydrożel nie wpływa na opóźnianie procesu gojenia się rany, dzięki czemu może być nałożony na dno rany na okres kilku dni. W tym czasie zapewnia odkażanie poprzez regularne oczyszczanie, nawilżanie i wytworzenie warstwy ochronnej na ranie. Ponadto utworzona cienka warstwa ochronna stanowi barierę pomiędzy powierzchnią rany a opatrunkiem, minimalizuje przywieranie opatrunku do powierzchni rany oraz ogranicza wzrost drobnoustrojów osiedlających się na powierzchni opatrunku. W ten sposób wzrasta skuteczność opatrunku.

Wskazania:

W przypadku niewielkich ran wystarczy użycie produktu SutriSept Płyn na rany. W przypadku większych i głębokich ran powierzchnię rany najpierw przemywa się SutriSept Płyn na rany a następnie wypełnia SutriSept Hydrożel na rany.

SutriSept Hydrożel na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

- Oczyszczanie, irygacja i nawilżanie ran ostrych (np. ran urazowych, które powstały w wyniku skaleczeń, rozerwania, zadrapań i otarć, zgnieceń, ugryzień, ukąszeń itp. w tym także ran chirurgicznych);
- ran przewlekłych (np. owrzodzeń cukrzycowych, owrzodzeń żylnych, odleżyn itp.);
- ran powstałych w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzeń 1. i 2. stopnia, oparzeń chemicznych itp.);
- ran powstałych w wyniku porażenia prądem elektrycznym;
- ran powstałych od oparzeń radiacyjnych;
- miejsc wprowadzenia cewników urologicznych;
- skóry w okolicach stomii, przetoki, ropni.

SutriSept Hydrożel na rany jest odpowiedni także do:

- nawilżania materiałów opatrunków takich jak bandaże, opatrunki, kompresy i wypełniacze przez ich nałożeniem;
- nawilżania i odkażania materiałów medycznych, takich jak bandaże, opatrunki, kompresy i wypełniacze ran, które wyschły, przywarły do powierzchni rany i uległy zanieczyszczeniu, przez ich usunięciem z rany.

Zalety produktu:

- Pierwszy wybór na rany oparzenia;
- Utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany;
- Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie;
- Bezboleśnie nawilża ranę;
- Nie szczypie, nie boli – nie zawiera alkoholu;
- Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego;
- Kompatybilny ze wszystkimi opatrunkami na rany;
- Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania.

Sposób użycia i zawartość opakowania

Przed założeniem opatrunku

Krok 1

Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept® Płyn na rany.

Krok 2

Oczyszczoną ranę należy pokryć dużą ilością SutriSept® w Gel Hydrożel na rany.

Krok 3

Hydrożel można stosować bezpośrednio na ranę, jak również na bandaż i gazę.

Krok 4

Odpowiednio zabandażować ranę.

Krok 5

Hydrożel może pozostać na powierzchni rany do następnej zmiany opatrunku. Przy zmianie opatrunku pozostałość hydrożelu należy wypłukać płynem SutriSept®. SutriSept® w Gel Hydrożel na rany wykazują kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

Opakowanie:

tuba o pojemności 30 ml i 100 ml.

Składniki

Jedyne połączenie takich substancji jak:

0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer 188 1%

PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania

Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran

Środki ostrożności:

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania.

Nie jest odpowiedni do stosowania na chrząstkę szklistą i w przypadku aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go aplikować do oczu.

Jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik wyrobu.

W obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.

Razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, olejkami, enzymami itp., substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem wyrobu.
Nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.