

# SutriSept Płyn, 250 ml



Cena: 46,13 zł

## Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VERCO
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Opis:

SutriSept w Solution Płyn na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń 1. i 2. stopnia. SutriSept bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do oczyszczania oraz nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran.

Pierwszy wybór na rany.

Jest on także odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu.

Zgodnie z najnowszymi (z 2020 roku) wytycznymi ekspertów SutriSept rekomendowany jest jako pierwszy wybór w:

- Odkażaniu ran;
- Oparzeniach;
- Ranach zainfekowanych;
- Ranach z biofilmem.

### Działanie:

SutriSept w Solution Płyn oczyszcza rany mechanicznie. Wchodzące w skład wyrobu środki powierzchniowo czynne, poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewniają wygodne i bezbolesne oczyszczanie rany. SutriSept® w Solution Płyn przyczynia się do gojenia rany zapewniając wysoce pozytywne działania oczyszczające i nawilżające na powierzchniach, na których jest aplikowany.

### Wskazania:

SutriSept Płyn na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

- Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia itp., rany chirurgiczne);
- Zakażone i niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żyłne, odleżyny itp.);
- Zakażone i niezakażone rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia, oparzenia chemiczne itp.);
- Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego;
- Rany popromienne;
- Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych;
- Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni.

#### SutriSept Płyn na rany odpowiedni także:

- Do oczyszczania i pielęgnacji powierzchni rany przed założeniem opatrunku.
- Do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran.

#### **Zalety produktu:**

- Pierwszy wybór na rany i oparzenia
- Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie
- Bezboleśnie oczyszcza i nawilża ranę
- Nie szczypie, nie boli – nie zawiera alkoholu
- Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego
- Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania
- Wygodny w użyciu atomizer rozpylający

#### **Sposób użycia i zawartość opakowania:**

##### Przed założeniem opatrunku:

Krok 1

Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept Płyn na rany.

Krok 2

Rany z głęboką i rozległą tkanką martwiczą należy przemywać przez 10 do 15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez założenie mokrego opatrunku).

Krok 3

Aplikację należy powtarzać w zależności od stanu rany, bez żadnych ograniczeń czasowych.

Krok 4

Płynu nie należy rozcieńczać! Na oczyszczonej ranę można zastosować wyrób medyczny SutriSept w Gel Hydrożel na rany.

Krok 5

Odpowiednio zabandażować ranę.

##### Po założeniu opatrunku:

Krok 1

Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept® w Solution Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 minut, aż zmiękną, po czym ostrożnie usunąć je z rany.

Krok 2

Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept® w Solution zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie ułatwia zmianę opatrunku.

Krok 3

SutriSept w Solution Płyn na rany wykazują kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept w Solution Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept w Solution Płyn na rany.

#### **Dostępne opakowanie:**

płyn w butelce z atomizerem 50 ml, 250 ml, bez atomizera 500 ml, 1000 ml

#### **Składniki:**

Jedynie połączenie takich substancji jak:

0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer 188 1%  
PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania  
Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran

#### **Środki ostrożności**

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania.

Nie jest odpowiedni do stosowania na chrząstkę szklistą i w przypadku aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go aplikować do oczu.

Jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik wyrobu.

W obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.

Razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, olejkami, enzymami itp., substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem wyrobu.

Do płukania i przemywania otrzewnej.

Nie stosować w pierwszych czterech miesiącach ciąży. W zależności od oceny korzyści w stosunku do ryzyka stosowania płynu

SutriSept® w Solution w późniejszym okresie ciąży należy oceniać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.