

Test Influenza A/B+COVID19/RSV Combo Ag*1 sztCorDx

Cena: 7,73 zł



Opis słownikowy

Postać	Test
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	CORDX
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

CorDx TEST COMBO 4 w 1

CorDx to jest testem immunochromatograficznym do diagnostyki domowej in vitro, przeznaczonym do jakościowego, różnicowego wykrywania antygenu białka nukleokapsydu wirusa:

- grypy typu A (włączając w to podtyp H1N1)
- grypy typu B
- RSV
- SARS-CoV-2

Badanie można wykonywać zarówno u osób wykazujących objawy zakażenia (w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia symptomów), jak i u osób, u których nie występują żadne objawy.

Zawartość opakowania:

- kasetka testowa
- sterylna wymazówka
- probówka z buforem
- statyw
- woreczek na odpady
- instrukcja użytkowania w języku polskim

Warunki przechowywania:

Testy należy przechowywać w temperaturze 2°C ~ 30°C w chłodnym, ciemnym, suchym miejscu.

Kasetkę testową należy użyć w ciągu 1 godziny po otwarciu saszetki.

Instrukcja użytkowania

Stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Wyniki testu odczytywane są po 15 minutach.

- Wynik pozytywny dla wirusa grypy typu A - pojawiają się dwie barwne linie, jedna w polu kontrolnym (C), druga w polu testowym T1.
- Wynik pozytywny dla wirusa grypy typu B - pojawiają się dwie barwne linie, jedna w polu kontrolnym (C), druga w polu testowym T2.
- Wynik pozytywny dla wirusa Covid-19 - pojawiają się dwie barwne linie, jedna w polu kontrolnym (C), druga w polu testowym T2.
- Wynik pozytywny dla wirusa RSV - pojawiają się dwie barwne linie, jedna w polu kontrolnym (C), druga w polu testowym T1
- Wynik negatywny - pojawia się tylko jedna barwna linia w polu kontrolnym (C).
- Wynik nieważny - jeśli nie pojawia się barwna linia w polu kontrolnym (C), wynik jest nieważny.