

# Test - Sprawdź kleszcza, zestaw: test borelioza+przyrząd do usuwania, 1 szt.

Cena: 14,57 zł



## Opis słownikowy

Postać	Test
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	Viatrix Sante
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Test diagnostyczny Sprawdź kleszcza - 1 szt.

### Wskazania:

Test diagnostyczny Sprawdź kleszcza został zaprojektowany z myślą o wykrywaniu bakterii boreliozy u kleszcza. Rekomendowany jest do zastosowania u każdej osoby, która została ukąszona przez tego pajęczaka.

### Właściwości:

Test diagnostyczny Sprawdź kleszcza to test płytkowy przeznaczony do szybkiego i bezpośredniego wykrywania bakterii boreliozy u kleszcza. Szybki test sprawdź kleszcza™ wykrywa bakterie B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmanii.

### Stosowanie:

W celu przeprowadzenia badania należy wyjąć test z foliowego opakowania rozrywając miejsce zgrzewu. Następnie przygotować pozostałe elementy potrzebne do wykonania testu: pipetę, butelkę z odczynnikami, patyczek drewniany, probówkę.

Badanie kleszcza najlepiej rozpocząć bezpośrednio po jego usunięciu. Ważnym elementem procedury testowania jest dokładne rozgniecenie kleszcza. Ostrożnie usuń kleszcza i upewnij się, że kleszcza został usunięty w całości. Kleszcza najlepiej usuwać pęsetą (lub odpowiednimi szczypcami lub haczykami) łapiąc go tuż przy nasadzie, czyli głowie i pociągając w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym jest wbity kleszcza. Miejsce po usunięciu należy zdezynfekować.

### Procedura badania

Optymalne wykonanie testu zależy od rozmiaru kleszcza:

- kleszcz jest mniejszy niż 8 mm – procedura badania „małe i średnie kleszcze”;
- rozmiar kleszcza przekracza 8 mm – procedura „duże kleszcze”.

#### Kleszcze małe i średnie:

- Umieść kleszcza w probówce i dodaj do niej 3 krople odczynnika.
- Ostrą stroną drewnianego patyczka rozgnieć kleszcza, aż płyn się odbarwi, a następnie wyjmij drewniany patyczek.
- Pobierz z probówki przy pomocy pipety uzyskany płyn, upewniając się, że nie bierzesz żadnych cząstek kleszcza.
- Odbierz 3 krople pobranego z probówki płynu do dołka testu płytkowego. Upewnij się, że nie pobrano żadnych cząstek kleszcza - mogą one zatkać pole testowe.
- jeżeli płyn nie przechodzi prawidłowo albo jeżeli kawałki kleszcza dostały się do dołka testu, można dodać dodatkową kroplę płynu.
- Płyn zaczyna przebiegać przez pasek testowy. Odczekaj 10 minut na wynik testu.

#### Duże kleszcze:

- Umieść kleszcza w probówce.
- Ostrą stroną drewnianego patyczka zmiażdż kleszcza.
- Pobierz płyn uzyskany po rozgnieceniu kleszcza przy pomocy pipety, upewniając się, że nie bierzesz żadnych cząstek kleszcza.
- Dodaj kroplę płynu uzyskanego po rozgnieceniu kleszcza do dołka testu płytkowego i pozostaw na kilka sekund.
- Bezpośrednio do dołka dodaj 2 krople odczynnika.
- Płyn zacznie przebiegać przez pasek testowy.
- Odczekaj 10 minut na wynik testu.

#### **Ważne informacje:**

Interpretacja wyniku testu: Pozytywny wynik testu oznacza, że kleszcz jest nosicielem jednego z 4 genotypów krętków boreliozy. Jeżeli doszło do ugryzienia, pilnie skontaktuj się lekarzem pierwszego kontaktu, gdyż istnieje wysokie ryzyko zarażenia krętkami boreliozy. Negatywny wynik testu oznacza, że kleszcz nie jest nosicielem bakterii boreliozy. Mimo ujemnego wyniku testu pamiętaj, że kleszcze przenoszą wiele chorób. W przypadku wystąpienia objawów, poinformuj lekarza, że doszło do ugryzienia.

Nieprawidłowy wynik Jeśli po przeprowadzeniu testu nie pojawi się żadna linia kontrolna, test jest nieprawidłowy. Prawdopodobnie badanie nie zostało przeprowadzone prawidłowo lub data ważności wygasła. W przypadku silnego barwienia tła po 10 minutach, kasetę testową może być opłukana pod zimną bieżącą wodą aby zmyć kolor tła; wynik badania pozostanie widoczny.

Test przechowuj w temperaturze od 2 do 30 °C z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, nie zamrażaj. Torebkę z testem otwórz przed bezpośrednim użyciem. Dokładnie zmiażdż kleszcza przed użyciem. Testu użyj wyłącznie raz i trzymaj go z dala od dzieci.

#### **Zestaw zawiera:**

- płytka testowa,
- pipeta,
- butelka z odczynnikiem,
- drewnianą szpatułkę,
- probówkę,
- instrukcję.