

ThermaCare, kompresy rozgrzewające na szyję ramiona nadgarstki, 2 szt.



Cena: 26,55 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Przechowywanie Temperatura pokojowa

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

ThermaCare Kompresy rozgrzewające na szyję ramiona nadgarstki

Wskazania:

ThermaCare Kompresy rozgrzewające na szyję ramiona nadgarstki to wyrób medyczny wskazany do stosowania w celu łagodzenia bólu mięśniowo-szkieletowego okolic szyi, barków, ramion i nadgarstka.

Właściwości:

ThermaCare Kompresy rozgrzewające na szyję ramiona nadgarstki to kompresy samorozgrzewające, przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i (lub) stawów związanych z nadmiernym wysiłkiem, przeciążeniami, skręceniami oraz zapaleniem stawów.

- Pomagają poprawić mobilność.
- Ulga w bólu do 16 godzin.
- Kompresy rozgrzewające ThermaCare® łagodzą ból do 16 godzin – 8 godzin podczas noszenia i do 8 godzin ulgi po zdjęciu kompresu.

Skład:

Opatentowane komórki ciepłne/ Nie zawiera substancji leczniczych.

Stosowanie:

1 raz na dobę, przez 8 godzin.

Opakowanie:

2 sztuki

Przeciwwskazania:

- Nie stosować jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo.
- Zmieniona chorobowo, podrażniona lub uszkodzona skóra.
- Siniaki lub obrzęki które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin.
- Obszary ciała z zaburzeniem czucia temperatury.

Przechowywanie:

Najlepiej przechowywać kompresy rozgrzewające ThermaCare® na szyję i ramiona w oryginalnym opakowaniu do momentu ich użycia. Chroni to foliową saszetkę przed uszkodzeniem i zapobiega otwarciu, które uaktywnia kompres rozgrzewający poprzez kontakt z tlenem. Należy stosować kompresy rozgrzewające na szyję i ramiona przed upływem terminu ważności, który podano na opakowaniu.