

UniGel, żel, 5 g

Cena: 21,12 zł



Opis słownikowy

Postać	Żel
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

Wyrób medyczny w postaci hydrofilowego żelu przeznaczonego do leczenia powierzchniowych ran na skórze. Skład żelu UniGel umożliwia wiązanie wolnych rodników tlenowych powstających wskutek stanu zapalnego. Żel wchłania nadmiar wysięku z rany, co wyraźnie przyspiesza proces gojenia. Zapewnia odpowiednią wilgotność i odczyn, ważne dla właściwego procesu gojenia. Nie przywiera do rany, można bezboleśnie go usunąć. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład:

Hydrofilowy żel metakrylowy złożony z usieciowanego kopolimeru 2-hydroksyetylometakrylanu, makroglu i wody destylowanej, który posiada polimerowo wiązane i sterycznie osłonięte grupy aminowe (HEMA-HAS).

Zawartość opakowania: Tuba 5 g.

Działanie:

UniGel zapewnia optymalne wartości pH oraz wilgotność w ranie, wspomagając w ten sposób proces gojenia. Ponadto działa jako bariera zabezpieczająca ranę przed zakażeniem.

Przeznaczenie:

Do leczenia powierzchniowych ran skóry.

Sposób działania:

Stosowanie wyrobu medycznego UniGel pozwala odizolować ranę i uchronić ją tym samym przed wtórnym zakażeniem z zewnątrz.

Preparat wytwarza odpowiednie środowisko niezbędne do prawidłowego procesu ziarninowania. Wytwarza na ranie elastyczną mechaniczną warstwę ochronną i wchłania z niej wysięk. Co więcej, chemiczne właściwości wyrobu pozwalają wiązać wolne rodniki tlenowe, powstające w trakcie procesu gojenia ran.

Sposób użycia:

Ranę oczyścić z zabrudzeń, np. pyłu.

Przy użyciu nakrętki przebić przebić górną część tubki.

Niewielką ilość preparatu (1 mm) należy nałożyć na powierzchnię rany, w taki sposób by w całości ją pokryła.

Przykryć ranę sterylnym gazikiem i umocować go za pomocą bandaża lub plastra. Drobne rany po zastosowaniu żelu można zabezpieczyć plastrem z opatrunkiem.

Po aplikacji żel pęcznieje. Unikalna struktura żelu zapobiega przywieraniu do rany, co umożliwia jego łatwe, bezbolesne usunięcie poprzez delikatne starcie lub zmycie.

Stosowanie:

Opatrunek należy wymieniać na nowy co 12-24 godziny. Czas ten jest uwarunkowany stanem rany, szczelnością opatrunku zewnętrznego lub zależy od zaleceń lekarza.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Przed zastosowaniem u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących należy skonsultować się z lekarzem.

Nie używać dłużej niż 30 dni. Dłuższe stosowanie powinno być skonsultowane z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pomiędzy 15-25°C.

Możliwe działania niepożądane:

W przypadku osób o podwyższonej wrażliwości lub po zastosowaniu w miejscach wrażliwych (np. okolica oczu), może wystąpić lekkie podrażnienie skóry (np.: swędzenie lub zaczerwienienie). W takiej sytuacji należy przerwać stosowanie żelu i skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Z uwagi na brak badań klinicznych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, takie pacjentki, przed zastosowaniem wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Z uwagi na brak badań klinicznych dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży, u takich pacjentów przed zastosowaniem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent

VH PHARMA

Dystrybutor

Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.

Sokratesa 13 D/27

01-909 Warszawa