

Vitam test ciążowy płytkowy, 1 szt.

Cena: 10,19 zł



Opis słownikowy

Postać	Test
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	DIAGNOSIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Vitam płytkowy test ciążowy to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu. Test można stosować już po 10 dniach po stosunku.

Cechy:

- Prosty – do samodzielnego wykonania;
- Czuły – wykrywa hCG przy stężeniu 25 mIU/ml;
- Wiarygodny – wiarygodność testu wynosi 99%;
- Dokładny – potrafi wykryć już 6 dniową ciążę;
- Szybki – wynik w ciągu 3-5 minut;
- W zestawie 1 test, 1 pipeta.

Vitam – płytkowy test ciążowy zaleca się wykonać najwcześniej w pierwszym dniu po terminie przewidywanej miesiączki.

Do przeprowadzenia testu wystarczy próbka porannego moczu zebrana do suchego i czystego naczynia. W opakowaniu testu znajdują się płytkowy test ciążowy oraz pipetka, za pomocą której należy pobrać 3 krople moczu, i umieścić w okienku testowym płytki.

Wynik otrzymujemy już po upływie 3-5 minut. Po 10 minutach wynik jest nieważny.

Pojawiające się 2 paski w strefie kontrolnej C oraz w strefie testowej T oznaczają wynik pozytywny, będący potwierdzeniem ciąży. Jeśli na teście pojawił się tylko jeden pasek w strefie kontrolnej C, wynik jest negatywny i oznacza, brak ciąży. Całkowity brak pasków lub pojawienie się jednego prążka w strefie testowej T wskazuje na błąd i taki wynik uznajemy za nieważny. W przypadku gdy wynik okaże się nieważny, badanie trzeba powtórzyć przy użyciu nowego testu ciążowego.

Pamiętaj! Przed przystąpieniem do badania koniecznie przeczytaj załączoną do testu ulotkę informacyjną.