

Zaspray, 10 ml



Cena: 56,67 zł

Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

ZASPRAY spray do powiek to wyrób medyczny w postaci nawilżającego i łagodzącego sprayu na powieki. Zawiera liposomowy roztwór na bazie kompleksu Per-Lip (liposom 4% + ekstrakt z nasion perilli 0,5%) oraz hialuronianu sodu. ZASPRAY daje uczucie świeżości i ochłody, łagodzi objawy podrażnienia oczu, oraz zapobiega odwodnieniu powierzchni oka. Zadaniem wyrobu medycznego ZASPRAY jest przywrócenie naturalnej równowagi powierzchni oka i ustabilizowanie filmu łzowego, zaburzonego przez alergeny, klimatyzację, wiatr, kurz, zanieczyszczenia, a także przez zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym noszeniem soczewek kontaktowych, pracą przed komputerem, niekorzystnymi warunkami oświetleniowymi.

Zastosowanie

ZASPRAY jest wskazany jako środek łagodzący i nawilżający suche oczy, szczególnie w przypadku alergii.

Sposób użycia

- ZASPRAY® zaleca się rozpylać na zamknięte powieki (jedna lub dwie aplikacje), 3 do 4 razy dziennie przez 3 do 4 kolejnych dni.
- Nie stosować dłużej niż przez 30 dni w sposób ciągły.

Składniki

Per-Lip, hialuronianu sodu, kwas borowy, tetraboran sodudziesięciowodny, PEG 300, wersenian disodu dwuwodny, chlorek sodu, woda.

Przeciwwskazania

- Nie stosować ZASPRAY® w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

Ostrzeżenia

- Nie wstrzykiwać ani nie połykać.

Dodatkowe informacje

- Bez konserwantów.
- Wyrób sterylny.

Producent/Podmiot odpowiedzialny

Thea Polska Sp. Z o.o.
ul. Cicha 7
00-353 Warszawa