

Zatoxin Rinse zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, proszek do sporządzania roztworu, 30 sasz.



Cena: 17,16 zł

Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

Wskazania:

Zestaw do płukania nosa i zatok zaleca się stosować :

- w zapaleniu zatok przynosowych
- w nieżyty nosa różnego pochodzenia
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

Zatoxin rinse atraumatycznie oczyszcza, udrażnia i nawilża zatoki i nos.

Zatoxin rinse zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok zawiera unikalną butelkę do irygacji, zakończoną zaworem, dwie końcówki dostosowane do wieku pacjenta i sposobu płukania: irygacja klasyczna i łagodna oraz 12 saszetek w kartoniku z proszkiem do sporządzania roztworu (składniki proszku do sporządzania roztworu: chlorek sodu i dwuwęglan sodu).

Zatoxin rinse dostępny jest także w formie zestawu uzupełniającego – 30 saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu (chlorek sodu i dwuwęglan sodu).

Zatoxin rinse może być stosowany przez dorosłych i dzieci od 4 r.ż. Dzieci mogą stosować zestaw jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Sposób dawkowania:

płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu. Roztwór

izotoniczny - 1 saszetka na 240 ml wody. Roztwór hipertoniczny - 2 saszetki na 240 ml wody.

Skład saszetki:

chlorek sodu, dwuwęglan sodu

Producent:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice